

HENROCUP®



GEBRAUCHSANLEITUNG

HENROCUP® UND DECKEL

MÄRZ 2023

Inhaltsverzeichnis

Wichtige Information	3
Bestimmungsgemäße Nutzung	3
Aufbewahrung.....	3
Gebrauchsanleitung.....	4
Vorsichtsmaßnahmen	4
Täglicher Gebrauch	4
Warnhinweise.....	5
Umweltfreundliche Entsorgung	5
Technisches Datenblatt HenroCup®	6
Technisches Datenblatt Deckel	7

Wichtige Information

Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch der HenroCup® diese Anleitung sorgfältig durch.

Bestimmungsgemäße Nutzung

HenroCup® wurde ausschließlich für Getränke und Lebensmittel entwickelt und ist nur für diese bestimmt.

HenroCup® ist ein von dänischen Ergotherapeuten entwickeltes Produkt und bietet Menschen, die unter Kraft- und Koordinationsverlust leiden, eine qualitativ hochwertige Tasse. HenroCup® enthält Bisphenol A (BPA) und sollte nicht von Kindern unter 3 Jahren verwendet werden.

HenroCup® bietet mit seinen 2 breiten Henkeln einen festen Halt. Dank der Form der Tasse und ihrer Henkel können Sie trinken, ohne den Hals zu krümmen. Der Tassenboden ist breiter, so dass die Tasse stabil auf dem Tisch steht und das Verschütten von Flüssigkeiten minimiert wird.

Aufbewahrung

Bewahren Sie das Produkt trocken, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt auf.

Gebrauchsanleitung

Inhalt: 1 HenroCup® wahlweise mit oder ohne Deckel.

1. Packen Sie die Tasse und den Deckel aus und entsorgen Sie die Verpackung sachgemäß.
2. Spülen Sie die Tasse und den Deckel vor dem Gebrauch.
3. Jetzt ist die HenroCup® einsatzbereit.

Vorsichtsmaßnahmen

Spülen Sie die HenroCup® nach dem Auspacken immer, bevor Sie sie benutzen.

Die Tasse ist für Getränke vorgesehen.

Durch heiße Getränke kann es zu Verfärbungen kommen und die Lebenszeit der Tasse könnte sich verkürzen.

Erhitzen Sie die HenroCup® nicht über einem Kerzenlicht oder Feuer.

Vorsicht bei heißer Flüssigkeit.

Wenn Sie den Deckel verwenden, überprüfen Sie bitte vor dem Gebrauch, ob der Deckel richtig sitzt und nicht lose ist.

Täglicher Gebrauch

HenroCup® kann bei bis zu 65° C in der Spülmaschine gespült werden.

Allerdings kann die Tasse matt werden und die Qualität nachlassen, deshalb empfiehlt es sich, sie von Hand zu spülen.

HenroCup® kann Temperaturen zwischen -20° C und 95° C vertragen

Warnhinweise

Bitte verwenden Sie in der HenroCup® keine Flüssigkeit mit einer Temperatur von über 95° C.



BITTE BEDENKEN SIE, DASS EINIGE GETRÄNKE DIE INNENSEITE DER TASSE VERFÄRBen KÖNNEN.

Wenn sich die Oberfläche nicht mehr glatt anfühlt und sich milchig-weiß verfärbt, sollten Sie die HenroCup® entsorgen.

Umweltfreundliche Entsorgung

Bitte entsorgen Sie die Tasse auf eine umweltfreundliche und neutrale Weise.



HenroCup® besteht aus Materialien, die recycelt werden sollten. Daher bitten wir Sie, alte HenroCups® über geeignete Entsorgungssysteme zu entsorgen.



SOLLTEN SIE ZWEIFEL HABEN, WANN SIE IHRE HENROCUP® ENTSORGEN SOLLTEN, KÖNNEN SIE EINE E-MAIL AN HENROTEK@HENROTEK.COM SCHICKEN

Technisches Datenblatt HenroCup®	
Material	PC (Polycarbonat)
Gewicht	139,2 g
Höhe	9 cm
Breite	15 cm
Bisphenol A (BPA)	HenroCup® enthält Bisphenol A (BPA) und sollte nicht von Kindern unter 3 Jahren verwendet werden.
Markiert	CE MD
Farbe	Transparent mit ml, Transparent, Rot, Grün, Blau
Milliliter	230 ml
Spülmaschine	65° Celsius
Mikrowelle	Ja
BASIC UDI-DI No.	57048311BU
UDI-DI HENROCUP® Transparent mit ml	05704831128777
UDI-DI HENROCUP® Grün	05704831128784
UDI-DI HENROCUP® Rot	05704831238791
UDI-DI HENROCUP® Transparent	05704831128890
UDI-DI HENROCUP® Blau	05704831128999
Hergestellt	Henrotek A/S Vestermarksvej 5, Roedding, Dänemark
Normen und Vorschriften	Vorschrift (EU) 1935/2004 vom 27 Oktober 2004 Vorschrift (EU) 2023/2006 vom 22. Dezember 2006 Dänischer Erlass, BEK Nr. 681 vom 25. Mai 2020 Vorschrift (EU3652) 10/2011 vom 14. Januar 2011 Vorschrift (EU) 2017/745 vom 5. April 2017

Technisches Datenblatt Deckel	
Material Deckel	LLDPE (Polyethylen)
Gewicht	13 g
Markiert	CE MD
Spülmaschine	<p>Spülmaschine 65° C</p> <p>Industrie-Spülmaschine 80° C Grad bis zu 3 Minuten</p> <p>Allerdings kann der Deckel matt werden und die Qualität nachlassen, deshalb empfiehlt es sich, ihn mit der Hand zu waschen.</p>
Mikrowelle	Nein
BASIC UDI-DI No.	57048311BU
UDI-DI HENROCUP® Deckel klein	5704831000271
UDI-DI HENROCUP® großer Deckel	5704831000011
Hergestellt	Henrotek A/S Vestermarksvej 5, Roedding, Dänemark
Normen und Vorschriften	<p>Vorschrift (EU) 1935/2004 vom 27 Oktober 2004</p> <p>Vorschrift (EU) 2023/2006 vom 22. Dezember 2006</p> <p>Dänischer Erlass, BEK Nr. 681 vom 25. Mai 2020</p> <p>Vorschrift (EU3652) 10/2011 vom 14. Januar 2011</p> <p>Vorschrift (EU) 2017/745 vom 5. April 2017</p>