

HENROTEK®



GEBRAUCHSANLEITUNG

HENROGRIP®

Dezember 2023

Inhaltsverzeichnis

Wichtige Information	3
Bestimmungsgemäße Nutzung.....	3
Aufbewahrung.....	3
Gebrauchsanleitung.....	4
Vorsichtsmaßnahmen	4
Täglicher Gebrauch	5
Warnhinweise.....	5
Umweltfreundliche Entsorgung	5
Technisches Datenblatt HenroGrip®	6

Wichtige Information

Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch von HenroPlate® diese Anleitung sorgfältig durch.

Bestimmungsgemäße Nutzung

HenroGrip® ist nur für Lebensmittel entwickelt und bestimmt.

HenroGrip® wurde von dänischen Ergotherapeuten entwickelt, um Menschen, denen es beim Essen an Kraft und Motorik mangelt, qualitativ hochwertiges Besteck zur Verfügung zu stellen.

HenroGrip® wurde mit einem gebogenen Griff entwickelt und ist aus einem Material gefertigt, das einen sicheren Halt bietet. Das Besteck wurde sowohl für Links- als auch für Rechtshänder entwickelt.

Aufbewahrung

Bewahren Sie das Produkt trocken, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt auf.

Gebrauchsanleitung

1. Packen Sie den HenroGrip® aus und entsorgen Sie die Verpackung sachgemäß.
2. Spülen Sie HenroGrip® vor dem Gebrauch.
3. HenroGrip® ist jetzt bereit für den Einsatz.

Vorsichtsmaßnahmen

Bitte spülen Sie HenroGrip® nach dem Auspacken immer, bevor Sie es benutzen.

HenroGrip® kann für alle Lebensmittel verwendet werden.

Erhitzen Sie HenroGrip® nicht über Kerzenlicht oder Feuer.

Täglicher Gebrauch

HenroGrip® kann bei bis zu 65° C in der Spülmaschine gespült werden.

Warnhinweise



BITTE BEDENKEN SIE, DASS DAS SPÜLEN DES HENROGRIP IN EINER INDUSTRIELLEN SPÜLMASCHINE BEI 90° C DIE HANDFLÄCHE DES GRIFFS BESCHÄDIGEN KANN.

Umweltfreundliche Entsorgung

Bitte entsorgen Sie den Griff auf eine umweltfreundliche und neutrale Weise.



HenroGrip® besteht aus Materialien, die recycelt werden sollten. Bitte entsorgen Sie deshalb Ihren alten HenroGrip® über entsprechende Entsorgungssysteme.



SOLLTEN SIE ZWEIFEL HABEN, WANN SIE HENROGRIP® ENTSORGEN SOLLTEN, KÖNNEN SIE EINE E-MAIL AN HENROTEK@HENROTEK.COM SCHICKEN

Technisches Datenblatt HenroGrip®	
Material	PP (Polypropylen mit 30% Mineralien) TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Bisphenol A (BPA)	HenroGrip® ist frei von Bisphenol A (BPA)
Markiert	CE
Gewicht	40,5 g (Gabel) 41 g (Messer) 42,5 g (Löffel)
Länge	16,5 cm
Farbe	Rot, Grau
Spülmaschine	65° Celsius
BASIC UDI-DI No.	57048313BY
UDI-DI HenroGrip® Messer, Rot	05704831128319
UDI-DI HenroGrip® Messer, Grau	05704831128326
UDI-DI HenroGrip® Gabel, Linkshändig, Grau	05704831128340
UDI-DI HenroGrip® Löffel, Rechtshändig, Grau	05704831128364
UDI-DI HenroGrip® Löffel, Linkshändig, Grau	05704831128388
UDI-DI HenroGrip® Gabel, Rechtshändig, Grau	05704831128401
UDI-DI HenroGrip® Gabel, Linkshändig, Grau	05704831128432

UDI-DI HenroGrip® Löffel, Rechtshändig, Rot	05704831128449
UDI-DI HenroGrip® Löffel, Linkshändig, Rot	05704831128456
Normen und Vorschriften	<p>Vorschrift (EU) 1935/2004 vom 27 Oktober 2004</p> <p>Vorschrift (EU) 2023/2006 vom 22. Dezember 2006</p> <p>Dänischer Erlass, BEK Nr. 681 vom 25. Mai 2020</p> <p>Vorschrift (EU3652) 10/2011 vom 14. Januar 2011</p> <p>Vorschrift (EU) 2017/745 vom April 2017</p>