

# **HENROTEK®**



## **KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA**

**HENROGRIP®**

**Joulukuu 2023**

## Sisällysluettelo

<b>Tärkeää tietoa .....</b>	<b>3</b>
<b>Käyttötarkoitus .....</b>	<b>3</b>
<b>Varastointi .....</b>	<b>3</b>
<b>Käyttöohjeet .....</b>	<b>3</b>
<b>Varotoimenpiteet .....</b>	<b>3</b>
<b>Päivittäinen käyttö .....</b>	<b>3</b>
<b>Varoitukset .....</b>	<b>4</b>
<b>Ympäristöystävällinen hävittäminen .....</b>	<b>4</b>
<b>Tekninen tietolehti HenroGrip® .....</b>	<b>5</b>

## Tärkeää tietoa

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen HenroGrip®:n käyttöä.

## Käyttötarkoitus

HenroGrip® on suunniteltu ja tarkoitettu vain elintarvikkeisiin.

Tanskalaiset toimintaterapeutit ovat kehittäneet HenroGrip®-ruokailuvälineet, joiden tarkoituksena on taata korkealaatuiset ruokailuvälineet ihmisille, joiden voimat ja motoriset taidot ovat heikentyneet ruokailutilanteissa.

HenroGrip® on suunniteltu kaarevalla otteella ja materiaalilla, joka antaa tukevan otteen. Ruokailuvälineet on suunniteltu sekä oikea- että vasenkätisille.

## Varastointi

Säilytä kuivana, huoneenlämmössä ja poissa auringonvalolta.

## Käyttöohjeet

1. Pura HenroGrip® ja hävitä pakkaus asianmukaisesti.
2. Ennen käyttöä pese HenroGrip®.
3. HenroGrip® on nyt käyttövalmis.

## Varotoimenpiteet

Pakkauksen purkamisen jälkeen pese HenroGrip® aina ennen käyttöä.

Kahvaa voidaan käyttää kaikille elintarvikkeille.

Älä lämmitä kahvaa kynttilänvalossa tai nuotiolla.

## Päivittäinen käyttö

HenroGrip® voidaan pestä astianpesukoneessa enintään 65° C asteessa.

## Varoitukset



**HUOMIOI, ETTÄ HENROGRIPIN PESEMINEN 90 ASTEEN LÄMPÖTILASSA PESTÄVÄSSÄ ASTIANPESUKONEESSA VOI VAHINGOITTA AKAHVAN KÄSIN KOSKETELTAVAA OSAA.**

## Ympäristöystävällinen hävittäminen

Hävitä kahva ympäristöystävällisen neutraalilla tavalla.



HenroGrip® on valmistettu materiaalista, joka tulisi kierrättää. Hävitä siksi vanha HenroGrip® sopivien keräysjärjestelmien kautta.



**JOS OLET EPÄVARMA SIITÄ, MILLOIN HENROGRIP® ON HÄVITETTÄVÄ, VOIT LÄHETTÄÄ SÄHKÖPOSTIA OSOITTEeseen HENROTEK@HENROTEK.COM.**

## Tekninen tietolehti HenroGrip®

<b>Materiaali</b>	PP (polypropeeni, jossa on 30 % mineraaleja) TPE (termoplastinen elastomeeri)
<b>BPA</b>	HenroGrip® on BPA-vapaa
<b>Merkitty</b>	<b>CE</b>
<b>Paino</b>	40,5 g (haarukka) 41 g (veitsi) 42,5 g (lusikka)
<b>Pituus</b>	16,5 cm
<b>Väri</b>	Harmaa, punainen
<b>Astianpesukone</b>	65° C astetta
<b>BASIC UDI-DI-numero</b>	57048313BY
<b>UDI-DI HenroGrip® veitsi, punainen</b>	05704831128319
<b>UDI-DI HenroGrip® veitsi, harmaa</b>	05704831128326
<b>UDI-DI HenroGrip® haarukka, vasenkätinen, harmaa</b>	05704831128340
<b>UDI-DI HenroGrip® lusikka, oikeakätinen, harmaa</b>	05704831128364
<b>UDI-DI HenroGrip® lusikka, vasenkätinen, harmaa</b>	05704831128388
<b>UDI-DI HenroGrip® haarukka, oikeakätinen, harmaa</b>	05704831128401
<b>UDI-DI HenroGrip® haarukka, vasenkätinen, harmaa</b>	05704831128432
<b>UDI-DI HenroGrip® lusikka, oikeakätinen, punainen</b>	05704831128449

<b>UDI-DI HenroGrip® lusikka, vasenkätinen, punainen</b>	05704831128456
<b>Standardit ja asetukset</b>	<p>Asetus (EY) 1935/2004, annettu 27. lokakuuta 2004</p> <p>Asetus (EY) 2023/2006, annettu 22. joulukuuta 2006</p> <p>Tanskan täytäntöönpanomääräys, BEK nr 681, 25/05/2020</p> <p>Asetus (EY) 10/2011, annettu 14. tammikuuta 2011</p> <p>Asetus (EU) 2017/745, annettu huhtikuussa 2017</p>