

HENROTEK®



ユーザーマニュアル

HENROGRIP®

2023年12月

目次

重要事項	3
用途.....	3
保管方法	3
使用方法	3
使用上の注意	3
日常のお手入れ.....	3
警告.....	4
環境に配慮した廃棄.....	4
技術データシート HenroGrip®	5

重要事項

HenroGrip®を使用する前に、この説明書をよく読んでください。

用途

HenroGrip®は食品専用にデザインされています。

HenroGrip®は、デンマークの作業療法士によって開発された、筋力が低下し体を思うように動かせない人のための高品質なカトラリーです。

HenroGrip®は、カーブしたグリップとしっかり握れる素材でデザインされています。カトラリーは右利き用と左利き用の両方があります。

保管方法

直射日光を避け、室温で乾燥した状態で保管してください。

使用方法

1. HenroGrip®を開梱し、梱包材を適切に廃棄してください。
2. 使用前に HenroGrip®を洗ってください。
3. これで HenroGrip®の使用準備が整いました。

使用上の注意

開梱したら、使用前に必ず HenroGrip®を洗ってください。

グリップはすべての食品に使えます。

キャンドルのあかりや火でグリップを温めないでください。

日常のお手入れ

HenroGrip®は 65°Cまでの食器洗い機で洗うことができます。

警告



HENROGRIP を業務用食器洗浄機で 90°C の温度で洗浄すると、グリップのハンドルが損傷することがありますのでご注意ください。

環境に配慮した廃棄

環境に配慮した中立的な方法でグリップを廃棄してください。



HenroGrip® はリサイクル可能な素材で作られています。そのため、古くなった HenroGrip® は適切な回収システムで廃棄してください。



HENROGRIP® の廃棄時期についてご不明な点がございましたら、
HENROTEK@HENROTEK.COM までメールをお送りください。

技術データシート HenroGrip®

素材	PP（鉱物を 30%含むポリプロピレン） TPE（熱可塑性エラストマー）
ビスフェノール A	HenroGrip®はビスフェノール A フリーです
マーク	CE
重量	40.5 グラム（フォーク） 41 グラム（ナイフ） 42.5 グラム（スプーン）
長さ	16.5cm
カラー	グレー、レッド
食器洗い機	65° C
Basic UDI-DI 番号	57048313BY
UDI-DI HenroGrip®ナイフ、レッド	05704831128319
UDI-DI HenroGrip®ナイフ、グレー	05704831128326
UDI-DI HenroGrip®フォーク、左手、グレー	05704831128340
UDI-DI HenroGrip®スプーン、右手、グレー	05704831128364
UDI-DI HenroGrip®スプーン、左手、グレー	05704831128388
UDI-DI HenroGrip®フォーク、右手、グレー	05704831128401
UDI-DI HenroGrip®フォーク、左手、グレー	05704831128432
UDI-DI HenroGrip®スプーン、右手、レッド	05704831128449
UDI-DI HenroGrip®スプーン、左手、レッド	05704831128456

規格と規制	2004 年 10 月 2006 年 12 月 22 日付規則 (EC) 2023/2006 デンマークの行政命令、2020 年 5 月 25 日付 BEK 681 号 2011 年 1 月 14 日付規則 (EC) 10/2011 2017 年 4 月 5 日付規則 (EU) 2017/745
--------------	---