

HENROPLATE®



ユーザーマニュアル

HENROPLATE®

2023年12月

目次

目次.....	2
重要事項	3
用途.....	3
保管方法	3
使用方法	4
使用上の注意	4
日常のお手入れ.....	4
警告.....	5
環境に配慮した廃棄.....	5
技術データシート HenroPlate®.....	6

重要事項

HenroPlate®を使用する前に、この説明書をよく読んでください。

用途

HenroPlate®は食品専用デザインされています。

HenroPlate®は、デンマークの作業療法士によって開発された、筋力が低下し体を思うように動かせない人のための高品質なプレートです。HenroPlate®はビスフェノール A フリーで、3歳未満のお子さまでも安心してお使いいただけます。

HenroPlate®は背面が高く、前面が低い、傾斜のあるデザインとなっています。傾斜のあるデザインにより、食材が片側に滑り落ちるため、片手で食べることができます。HenroPlate®には小さなゴム足が付属しており、底面に取り付けることで、テーブルの上でしっかりと載せることができます。

HenroPlate®は、病院、老人ホーム、住宅などの特別な施設でも使用できます。

保管方法

直射日光を避け、室温で乾燥した状態で保管してください。

使用方法

内容物：HenroPlate®1枚に4本足が4セット付属しています。

1. プレートと脚を開梱し、梱包材を適切に廃棄してください。
2. 使用前にプレートを洗ってください。
3. 洗浄後：足を4本取り外し、皿の底にある4つの穴に差し込みます。
4. これでHenroPlate®の使用準備が整いました。

使用上の注意

HenroPlate®は使用前に必ず洗ってください。

HenroPlate®はすべての食品に使用できます。

キャンドルのあかりや火でHenroPlate®を温めないでください。

日常のお手入れ

HenroPlate®は、65°Cまでの食器洗い機と80°Cまでの業務用食器洗浄機で3分まで洗うことができます。

洗うときはゴム足を外してください。

HenroPlate®は電子レンジに対応しています。

HenroPlate®は、-20°C~100°Cの温度範囲に対応しています。

警告



洗う前に足を外してください

環境に配慮した廃棄

HenroPlate®の底面には PET マークがあり、素材情報が記載されています。

HenroPlate®は、環境に配慮した中立的な方法で廃棄してください。



HenroPlate®はリサイクル可能な素材で作られています。そのため、古くなった HenroPlate®は適切な回収システムで廃棄してください。



HENROPLATE®の廃棄時期についてご不明な点がございましたら、
HENROTEK@HENROTEK.COM までメールをお送りください。

技術データシート HenroPlate®	
素材	PP - ポリプロピレン
マーク	CE
重量	202 グラム
高さ	28.5 cm
幅	19.5 cm
食器洗い機	80° C
冷凍庫	-20° C
電子レンジ	可
Basic UDI-DI 番号	57048315C4
UDI-DI	05704831129026
規格と規制	2004 年 10 月 2006 年 12 月 22 日付規則 (EC) 2023/2006 デンマークの行政命令、2020 年 5 月 25 日付 BEK 681 号 2011 年 1 月 14 日付規則 (EC) 10/2011 2017 年 4 月 5 日付規則 (EU) 2017/745
アクセサリ-素材	HenroPlate® 足 (TPE - 熱可塑性エラストマー)