

HENROPLATE®



POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

HENROPLATE®

December 2023

Obsah

Obsah	2
Dôležité informácie	3
Zamýšľané použitie	3
Skladovanie	3
Návod na použitie	4
Bezpečnostné opatrenia	4
Denná prevádzka	4
Upozornenia	5
Ekologická likvidácia	5
Hárok s technickými údajmi HenroPlate®	6

Dôležité informácie

Pred použitím HenroPlate® si pozorne prečítajte tieto pokyny.

Zamýšľané použitie

HenroPlate® sú navrhnuté a určené len na potraviny.

HenroPlate® vyvinuli dánski ergoterapeuti s cieľom zabezpečiť vysokokvalitný tanier pre ľudí, ktorí strácajú silu a koordináciu. HenroPlate® neobsahuje BPA a môžu ho bezpečne používať deti do 3 rokov.

Tanier HenroPlate® má vysokú zadnú časť a nízku prednú časť, čo vytvára zošikmený dizajn.

Šikmý dizajn umožňuje posúvanie jedla na jednu stranu, takže je možné jesť jednou rukou.

Tanier HenroPlate® sa dodáva s malými gumovými nožičkami, ktoré sa dajú pripevniť na spodnú časť, vďaka čomu HenroPlate® pevne stojí na stole

HenroPlate® možno použiť v nemocniciach, domovoch dôchodcov a špeciálnych zariadeniach.

Skladovanie

Skladujte v suchu, pri izbovej teplote a mimo dosahu priameho slnečného svetla.

Návod na použitie

4 sady 4 nožičiek

1. Rozbalte tanier a nožičky, obal riadne zlikvidujte.
2. Pred použitím tanier umyte.
3. Po umytí: odstráňte 4 nožičky a vložte ich do 4 otvorov na dne taniera.
4. HenroPlate® sú teraz pripravené na použitie.

Bezpečnostné opatrenia

Pred použitím HenroPlate® vždy umyte.

HenroPlate® možno použiť na všetky potraviny.

Neohrievajte HenroPlate® nad svetlom sviečky alebo ohňom.

Denná prevádzka

HenroPlate® možno umývať v umývačke riadu pri teplote do 65 °C a v priemyselnej umývačke riadu pri teplote do 80 °C až 3 minúty.

Pri umývaní odstráňte gumové nožičky.

HenroPlate® je vhodný na použitie v mikrovlnnej rúre.

HenroPlate® zvládne teplotný rozsah od -20 °C do 100 °C.

Upozornenia



PRED UMÝVANÍM ODSTRÁŇTE NOHY

Ekologická likvidácia

HenroPlate® má na spodnej strane značku PET s informáciami o materiáli. Prosím, zlikvidujte HenroPlate® ekologicky neutrálnym spôsobom.



HenroPlate® sú vyrobené z materiálu, ktorý by sa mal recyklovať. Starý HenroPlate® preto zlikvidujte prostredníctvom vhodných zberných systémov.



AK MÁTE AKÉKOLVEK POCHYBNOSTI O TOM, KEDY HENROPLATE® ZLIKVIDOVAŤ, MÔŽETE POSLAŤ E-MAIL NA ADRESU HENROTEK@HENROTEK.COM

Hárok s technickými údajmi HenroPlate®	
Materiál	PP - Polypropylén
Označené	CE
Hmotnosť	202 G
Výška	28,5 cm
Šírka	19,5 cm
Umývačka riadu	80 °C stupňov
Mraznička	-20 °C stupňov
Mikrovlnná rúra	Áno
Basic UDI-DI č.	57048315C4
UDI-DI	05704831129026
Normy a predpisy	Nariadenie (EC) 1935/2004 z 27. októbra 2004 Nariadenie (EC) 2023/2006 z 22. decembra 2006 Dánsky výkonný príkaz, BEK č. 681 z 25.5.2020 Nariadenie (EC) 10/2011 zo 14. januára 2011 Nariadenie (EÚ) 2017/745 z 5. apríla 2017
Príslušenstvo - Materiál	HenroPlate® Nožičky (TPE - termoplastický elastomér)