

HENROPLATE®



BRUKSANVISNING

HENROPLATE®

December 2023

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning	2
Viktig information	3
Avsedd användning	3
Förvaring	3
Anvisningar för användning	4
Försiktighetsåtgärder	4
Daglig användning	4
Varningar	5
Miljövänlig avfallshantering	5
Tekniskt datablad HenroPlate®	6

Viktig information

Läs dessa anvisningar noggrant innan användning av HenroPlate®.

Avsedd användning

HenroPlate® är utformad för och endast avsedd för livsmedel.

HenroPlate® har utvecklats av danska arbetsterapeuter för att säkerställa en högkvalitativ TALLRIK för personer som upplever förlust av styrka och koordination. HenroPlate® är fri från Bisfenol A och kan användas säkert av barn under 3 år.

HenroPlate® har en hög baksida och en låg framsida, vilket ger en lutande design.

Den lutande designen gör att maten glider ner till ena sidan, vilket gör det möjligt att äta med en hand.

HenroPlate® levereras med små gummifötter som kan fästas på undersidan, så att HenroPlate® står stadigt på bordet

HenroPlate® kan med fördel användas på sjukhus, vårdhem, bostäder och särskilda institutioner.

Förvaring

Förvaras torrt, i rumstemperatur och borta från solljus.

Anvisningar för användning

Innehåll: 1 HenroPlate® levereras med 4 uppsättningar med 4 fötter.

1. Packa upp tallriken och fötterna och kassera förpackningen på rätt sätt.
2. Diska tallriken före användning.
3. Efter diskning: bryt av 4 fötter och placera dem i de 4 hålen på undersidan av tallriken.
4. HenroPlate® är nu redo för användning.

Försiktighetsåtgärder

Diska alltid HenroPlate® före användning.

HenroPlate® kan användas för alla livsmedel.

Värm inte HenroPlate® över stearinljus eller eld.

Daglig användning

HenroPlate® kan diskas i diskmaskin upp till 65° C och i en industriell diskmaskin upp till 80° C under upp till 3 minuter.

Ta bort gummifötterna vid diskning.

HenroPlate® tål användning i mikrovågsugn.

HenroPlate® tål temperaturintervall på mellan -20° C och 100° C.

Varningar



TA BORT FÖTTERNA FÖRE DISKNING

Miljövänlig avfallshantering

HenroPlate® har en PET-märkning på undersidan med materialinformation. Kassera HenroPlate® på ett neutralt miljövänligt sätt.



HenroPlate® är tillverkat av material som ska återvinnas. Kassera därför förbrukade HenroPlate® Institution via lämpliga avfallshanteringssystem.



OM DU ÄR OSÄKER PÅ KASSERING AV HENROPLATE®, SKICKA ETT E-POSTMEDDELANDE TILL HENROTEK@HENROTEK.COM

Tekniskt datablad HenroPlate®	
Material	PP - Polypropylen
Märkt	CE
Vikt	202 g
Höjd	28,5 cm
Bredd	19,5 cm
Diskmaskin	80° C grader
Frysskåp	-20° C grader
Mikrovågsugn	Ja
Grundläggande UDI-DI nr.	57048315C4
UDI-DI	05704831129026
Standarder och föreskrifter	<p>Förordning (EG) nr 1935/2004 av den 27 oktober 2004</p> <p>Förordning (EG) nr 2023/2006 av den 22 december 2006</p> <p>Dansk kungörelse, BEK nr 681 av den 2020-05-25</p> <p>Förordning (EG) nr 10/2011 av den 14 januari 2011</p> <p>Förordning (EU) 2017/745 av den 5 april 2017</p>
Tillbehör Material	HenroPlate® fötter (TPE – termoplastisk elastomer)